




**THUASNE**

# LeGilet

Écharpe d'immobilisation d'épaule

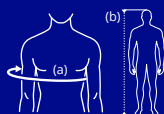


	(a)	(b)
1	60 - 90 cm	< 150 cm
2	91 - 120 cm	150 - 170 cm
3	121 - 150 cm	> 170 cm





© Thuasne 6167801 (2022-04) - © Studio Caterin  
Photo non contractuelle

**THUASNE**  
120, rue Marius AUFAN  
92300 Levallois-Perret - France  
[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)

	Tour de poitrine + humérus (a)	Taille du patient (b)
1	60 - 90 cm	< 150 cm
2	91 - 120 cm	150 - 170 cm
3	121 - 150 cm	> 170 cm

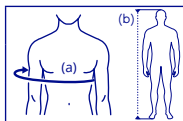

Immobilisation

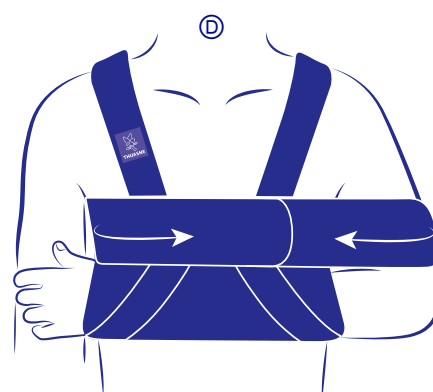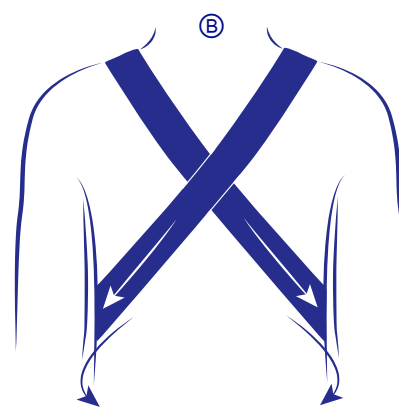

## ÉCHARPE D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

### Description/Destination

Ce dispositif est une orthèse permettant l'immobilisation de l'épaule et/ou du coude en rotation interne (coude-au-corps).

Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

### Composition

Polyester - polyuréthane - polyamide - coton.

### Propriétés/Mode d'action

Manchon doté de deux sangles pour le maintien du bras et de la main.

Large bande amovible permettant d'immobiliser le bras contre le corps.

Modèle bilatéral.

### Indications

Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude.

Traitement conservateur des fractures proximales non chirurgicales de l'humérus.

Luxation de l'épaule.

Fractures non chirurgicales de la clavicule et/ou de la scapula (omoplate).

Immobilisation postopératoire (suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou réduction de luxation).

Prévention de la subluxation ou luxation de l'épaule (instabilité articulaire).

Soutien du bras paralytique.

### Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.

Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Ne pas utiliser dans certaines situations postopératoires (fractures multiples, pose de broches, fractures ouvertes, etc.).

Ne pas utiliser en cas de fractures complexes ou chirurgicales de l'épaule, de l'humérus ou en cas de fractures des côtes.

### Précautions

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.

Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la première application.

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changement de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.

Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patches...).

Ne pas utiliser le dispositif lors de la conduite d'un véhicule.

Une immobilisation prolongée peut parfois entraîner une perte de tonus musculaire.

Si le dispositif est porté pour de longues périodes, s'assurer que la circulation sanguine n'est pas entravée.

Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien/une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine.

Porter le dispositif au-dessus d'un vêtement fin.

### Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

### Mode d'emploi/Mise en place

La mise en place de ce produit nécessite l'aide d'une tierce personne.

Placer l'avant-bras lésé dans le manchon. Ⓐ

Passer les 2 sangles au-dessus des épaules. Ⓐ

Croiser les deux sangles dans le dos. Ⓑ

Passer les 2 sangles sous le bras lésé et les accrocher sur l'avant du manchon. Ⓒ

Accrocher la large bande amovible sur le manchon, grâce aux auto-agrippants.

Faire le tour de la poitrine et du bras lésé et fixer la sangle sur le manchon. Ⓓ

### Entretien

Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Fermer les auto-agrippants avant lavage. Lavable en machine à 30 °C (cycle délicat). Le dispositif a été testé durant 20 cycles de lavage. Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

### Stockage

Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

### Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2011-05.

Conserver ces instructions d'utilisation.

[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)  
[www.thuasne.com/global-contact](http://www.thuasne.com/global-contact)



Thuasne SAS

SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 - capital 1 950 000 euros - 120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret (France)