

# LYMPHATREX Essential


## MANCHON

### Disposition des points de repères

- Ⓒ correspond au creux axillaire
- Ⓕ correspond au point le plus fort du biceps
- Ⓖ est localisé au niveau de l'olécrane
- Ⓓ équidistant entre E et C ou à la naissance de l'œdème
- Ⓒ<sub>1</sub> positionné à 6 cm du repère C
- Ⓒ se mesure au plus fin du poignet, face externe au milieu de l'articulation radio-cubitale


*Le bras doit être légèrement plié lors de la prise de mesures.*

→ *Positionnement du mètre pour la mesure des hauteurs.*

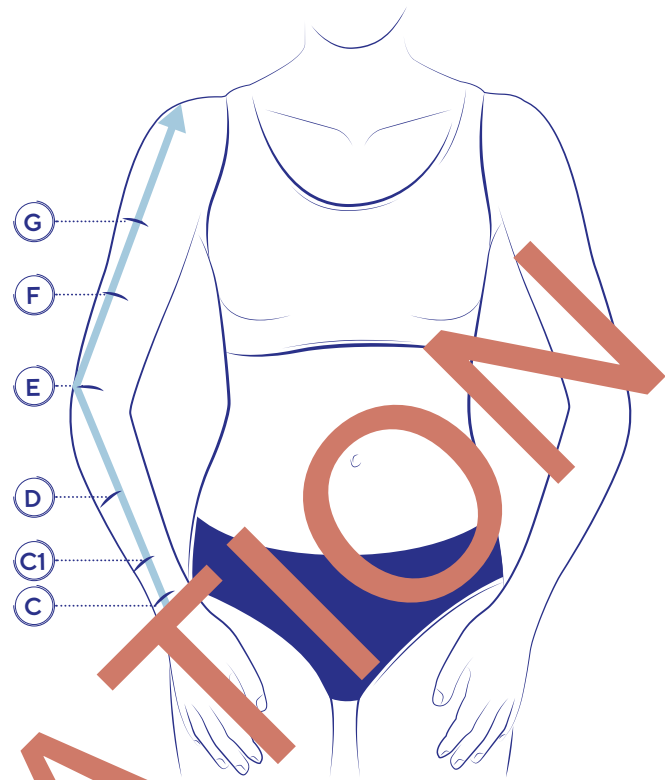

### Instructions de mesure

#### MANCHON

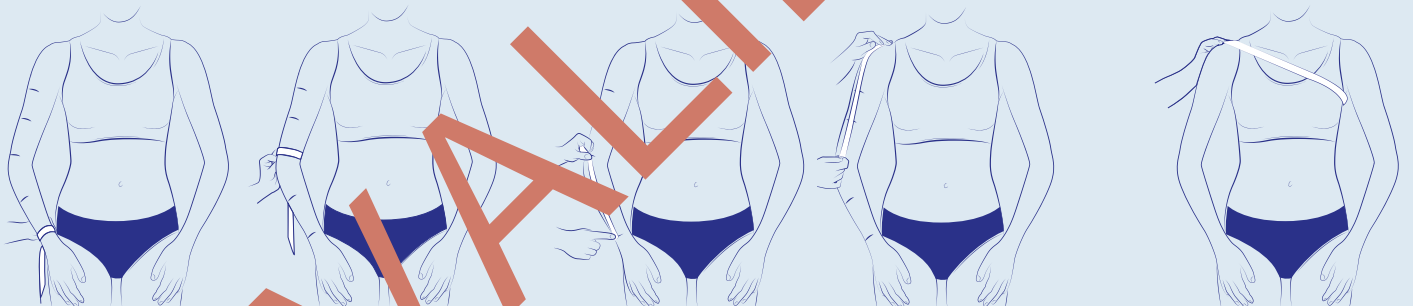


Mesure des circonférences


Les longueurs doivent être prises du milieu du poignet à la pointe du coude, puis à l'extérieur du bras jusqu'à la hauteur finie souhaitée.

Pour un couvre-épaule, bien prendre la circonférence thoracique (H), de l'acromion, en passant par le creux axillaire opposé.

#### MITAINE

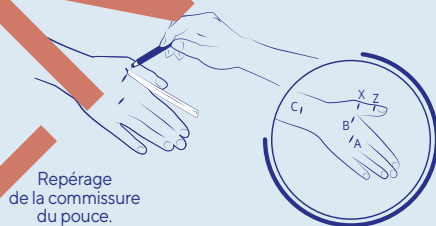


Repérage de la commissure du pouce.

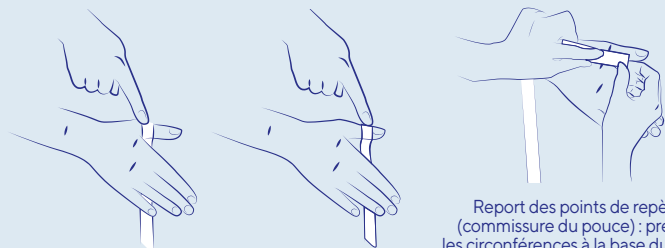

Report des points de repères (commissure du pouce): prendre les circonférences à la base du pouce et à l'extrémité (pour des raisons techniques, la longueur du pouce ne pourra être en deçà de 2 cm).



La circonférence à l'extrémité de la mitaine se situe au niveau de la tête des métacarpiens. Basculer sur les gants Cicatrex® si les doigts ont également besoin d'une pression.

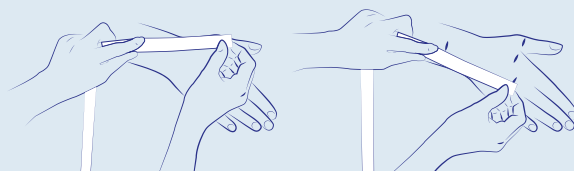

Prise de mesures longueur de la mitaine:  
1/ du poignet à la base du pouce  
2/ du poignet à la hauteur fine