



THUASNE®

INFORMATION IMPORTANTE RAPPEL DE PRODUIT

**Globe-Trotter
Globe-Trotter+**

Vous nous avez fait confiance en achetant nos produits Cannes Anglaises **Globe-Trotter et Globe-Trotter+** et nous vous en remercions.


Nous souhaitons vous informer d'un **risque de non-conformité** de nos dispositifs :

Cannes Anglaises Globe-Trotter et Globe-Trotter+

Jusqu'alors, nos produits étaient recommandés pour un poids maximum de 150 kg. **Par mesure de précaution nous avons décidé de réduire ce poids maximum à 130 kg.**

PAR CONSÉQUENT :

Si votre poids est supérieur à 130 kg, merci de ne plus utiliser nos produits et de les rapporter impérativement chez votre fournisseur.

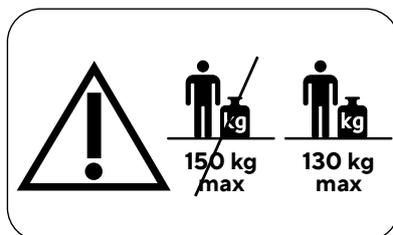

Si votre poids est inférieur à 130 kg, vous pouvez continuer d'utiliser nos produits. Cependant, merci de revenir vers votre fournisseur qui vous fournira un addendum à la notice d'utilisation ainsi que le sticker ci-contre à apposer sur le tube en aluminium.

**W2016021010
Globe-Trotter**



**W2016022010
Globe-Trotter**



**W2017021006
Globe-Trotter+**



*Nous vous prions d'accepter nos excuses pour les désagréments occasionnés par cette opération. Plus que jamais nous avons à cœur d'assurer la sécurité des patients.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions.*



Thuasne
120, rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret (France)
www.thuasne.fr

©Thuasne - 8658 092 001 - (2024-05)

