

LYMPHATREX Essential

MANCHON

1- Positionner les repères anatomiques



Sélectionner les repères anatomiques nécessaires selon le modèle de vêtement choisi.
Positionner les repères sur la face externe du bras et la face dorsale de la main.


BRAS

- (C)** Au point le plus fin du poignet
- (Cl)** À 6 cm du repère C
- (D)** Au plus fort de l'avant bras
- (E)** Au pli du coude
- (F)** Au point le plus fort du biceps
- (G)** Au creux axillaire
- (H)** Option couvre-épaule : à l'acromion

MAIN

- (B)** Dans l'axe de la commissure de pouce
- (A)** À la tête des métacarpes
- (X)** Option avec pouce : à la commissure du pouce
- (Z)** Option avec option : à l'arrêt souhaité du vêtement.

Éviter d'arrêter le vêtement sur l'ongle ou sur une articulation.

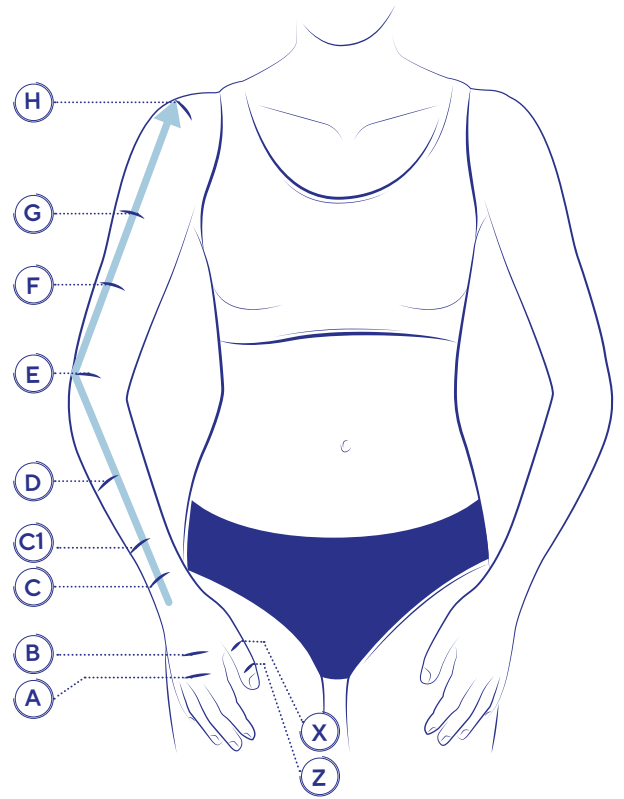


2- Mesurer les circonférences



Prendre les mesures en contact peau sans tirer sur le mètre ruban.

BRAS

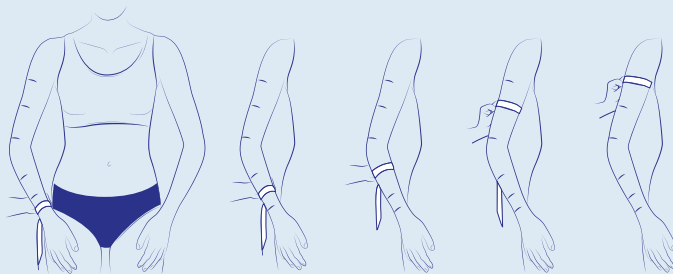

cC : ajouter 0,5 cm à la mesure pour plus de confort

cCl


cD

cF

cG

cE : prendre la mesure avec le bras légèrement fléchi

MAIN

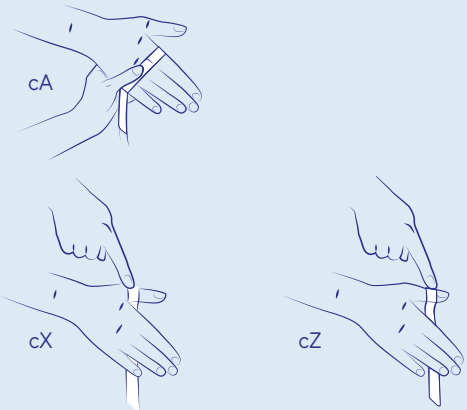

Option Pouce

cX


cZ

3- Mesurer les hauteurs



Prendre les mesures sur la face externe du bras, bras légèrement fléchi, avec le mètre ruban posé sur la peau.
Prendre les hauteurs du milieu du poignet jusqu'à la pointe du coude puis jusqu'au repère sous axillaire.


BRAS

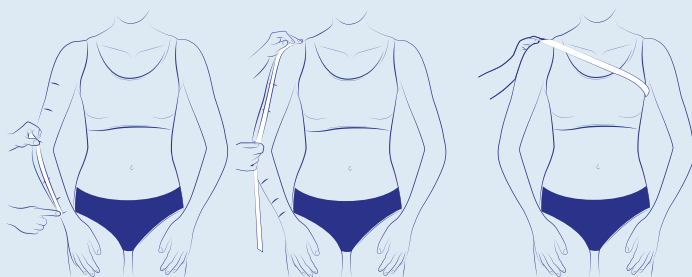

Hauteurs du bras depuis le poignet : cCl (6 cm), cD, cE, cF, cG

Option couvre-épaule : circonférence thoracique de l'acromion en passant sous le creux axillaire opposé (cH)
Option couvre-épaule : Distance entre le repère G et H (cGH)

MAIN

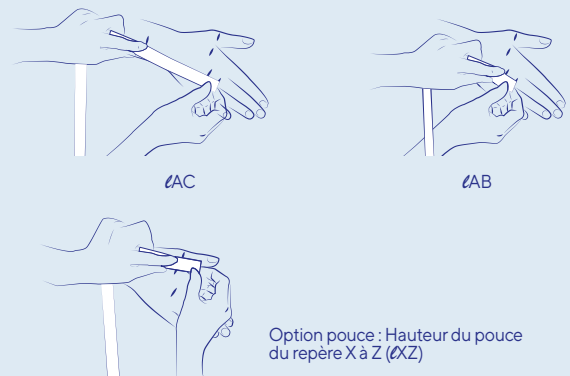

cAC

cAB

Option pouce : Hauteur du pouce du repère X à Z (cXZ)