

# PACK 30

L 120,5 mm X H 170,5 mm X P 39,5 mm

THUASNE  
Rhizoimmo



THUASNE  
Rhizoimmo  
Attelle de stabilisation du pouce

RHIZARTHROSE



www.thuasne.com

THUASNE

## Rhizoimmo

**Description/Destination**  
Ce dispositif est une attelle de pouce permettant la stabilisation de la main et du poignet.  
Le dispositif est destiné uniquement au traitement des rhizarthroses et à des patients dont les manifestations sont limitées à la douleur.  
**Composition**  
Composants textiles : Élasthane - Polyuréthane  
Composants rigides : Acier inoxydable  
**Propriétés/Mode d'action**  
Le dispositif agit par une action en tiraillement.  
Il agit sur le ligament de la base du pouce.  
Il agit sur le ligament de la base du pouce.  
**Indications**  
Affection du pouce (rhizarthrose).  
**Contre-indications**  
Ne pas utiliser le produit en cas de rhizarthrose aiguë.  
Ne pas utiliser le produit directement en contact avec une plaie.  
**Précautions**  
Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.  
Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau ci-dessous.  
Ne pas utiliser le produit en cas de rhizarthrose aiguë.  
Ne pas utiliser le produit en cas de rhizarthrose aiguë.  
Ne pas utiliser le produit en cas de rhizarthrose aiguë.  
Ne pas utiliser le produit en cas de rhizarthrose aiguë.  
**Entretien**  
Nettoyer le produit avec un chiffon humide.  
Ne pas utiliser de produits abrasifs.  
Ne pas utiliser de produits corrosifs.  
Ne pas utiliser de produits oxydants.  
Ne pas utiliser de produits inflammables.  
**Stockage**  
Stockage dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.  
Ne pas utiliser le produit en cas de rhizarthrose aiguë.  
**Élimination**  
Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.  
Ne pas brûler le produit.  
Ne pas jeter le produit dans les poubelles.  
Ne pas jeter le produit dans les égouts.  
Ne pas jeter le produit dans l'eau.  
**CE**  
THUASNE  
1847  
12500  
France

THUASNE

## Rhizoimmo

Tour de poignet  
1 13 - 17 cm  
2 17 - 23 cm

Stabilisation

© Studio Caterin



MD Dispositif médical  
Un seul patient - à usage multiple  
MIXTE Emballage FACTICE  
FRANCE ONLY

© Thuasne - 6470301 (2021-02)